

PL

Wskaźówki stosowania

Opis produktu

Zetuvit Plus jest opatrunkiem przeznaczonym do zaopatrywania ran silnie sączących. Warstwa chłonna wiąże wydzielinę, nie pozwalając jej wydobywać się na zewnątrz.

Części składowe

Zetuvit Plus jest kompresem chłonnym, składającym się z czterech różnych warstw materiałów. Strona przylegająca do rany składa się z bardzo miękkiej, białej, hydrofilowej włókny (wiskoza i poliamid), która chroni przed sklejaniem się z raną. Znajdująca się pod spodem warstwa chłonna wypełniona jest miękkimi płatkami celulozowymi zmieszanymi z polimerami posiadającymi bardzo wysokie właściwości wchłaniania. Warstwa ta otoczona jest cienką włókniną rozprzodającą równomiernie wysięk. Strona produktu przeciwna do rany pokryta jest zieloną włókniną polipropylenową, która mimo swojej hydrofobowości przepuszcza powietrze, zapewniając tym samym wymianę gazów.

Właściwości i sposób działania

Zetuvit Plus szybko wchłania wysięk i wydzielinę z rany, wiążąc je w warstwie chłonnej. Dzięki odprowadzeniu wysięku rana zostaje uwolniona od czynników hamujących leczenie, takich jak np. proteazy, i może się szybciej zagoić. Kompres Zetuvit Plus wyróżnia się wysoką zdolnością wchłaniania, co pozwala na rzadsze zmienianie opatrunku. Rana może się goić w spokoju, a ponadto zwiększa się ochrona przed jej zanieczyszczeniem.

Zetuvit Plus ma nie tylko właściwości chłonne, ale również właściwości wyścielające.

Zakres wykorzystania

Zetuvit Plus nadaje się do stosowania w przypadku ran powierzchniowych, silnie sączących, ostrych lub przewlekłych (takich jak odleżyny, owrzodzenia podduszia, owrzodzenia nowotworowe itp.).

Sposób wykorzystania

Wybrać odpowiednią wielkość kompresu Zetuvit Plus, tak by opatrunek przykrywał całą ranę i dodatkowo 1–2cm wokół niej. Opatrunku nie wolno przysicać. Zetuvit Plus przyłożyć do rany białą stroną. Zielona warstwa specjalnej włókny ma znajdować się po stronie przeciwnej do rany. Przytmocować opatrunek, używając do tego celu przylepka, opaski, lub w razie potrzeby, opaski uszkowej. Zmiana opatrunku jest konieczna, jeśli jest to wskazane klinicznie, jeśli wysięk dotrze do brzoğu kompresu chłonnego lub jeśli przelinknie przez zieloną warstwę specjalnej włókny.

W przypadku ran zainfekowanych można zastosować dodatkowo opatrunek Atrauman Ag.

Gdy ilość wysięku się zmniejsza, zaleca się zastosowanie odpowiedniego opatrunku hydroaktywnego (np. HydroTac).

Przeciwwskazania

Opatrunku Zetuvit Plus nie należy stosować na rany suche, odsonięte kości, mięśnie i ścięgna. Zetuvit Plus nie należy stosować przy nadwrażliwości na któryś ze składników.

Szczegółowe środki ostrożności

Przed każdym opatrzeniem rany, której proces gojenia jest zakłócony, należy skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu rany i przyczyn zaburzeń jej gojenia. Leczenie rany z wykorzystaniem Zetuvit Plus nie może zastąpić przyczynowego leczenia zaburzeń gojenia się rany. Szczelny szew opakowania jednostkowego zawiera lateks z naturalnego kauczuku, który może prowadzić do reakcji alergicznych!

Wskaźówki szczególne

Zawartość jałowa, dopóki opakowanie jednostkowe nie uległo uszkodzeniu.

Przechowywać w miejscu suchym w pozycji leżącej. Nie wyjalawiać ponownie. Chronić przed dziećmi.