





- Uklonite zaštitni papir na ljepljivoj strani.
- Postavite flaster na zahvaćeno područje kože. Nježno oblikujte rubove flastera da biste osigurali optimalno prijanjanje.
- Flaster skinite tek kad postane labav, primjena do 4 dana.
- Ako flaster sa žulja želite ukloniti prije, najprije ga navlažite toplom vodom.

#### Upiti korisnika

Ako je potrebno, obratite nam se na odgovarajuću adresu navedenu na kraju uputa. Svaki ozbiljan incident (koji može dovesti do smrti, trenutnog ili trajnog pogoršanja zdravlja pacijenta, korisnika ili druge osobe ili ozbiljnog javnozdravstvenog rizika) koji ovaj proizvod uzrokuje potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik ili pacijent nalazi.

Datum revizije i broj revizije teksta:  
2020-09-09, Version 1

#### Besondere Hinweise • Specijalne instrukcije Posebna navodila • Dodatni naputci

	Medizinprodukt • Wyrób medyczny Medicinski pripomoček • Medicinski proizvod
	Hersteller • Wytwórca • Proizvajalec Proizvođač
	Verwendbar bis • Użyć do daty Uporabno do • Rok upotrebe
	Herstellungsdatum • Data produkcji Datum proizvodnje • Datum proizvodnje
	Fertigungslosnummer • Kod partii Koda serije • Šifra serije
	Artikelnummer • Numer katalogowy • Kataloška številka Kataloški broj

	Gebrauchsanweisung beachten Zajrzyj do instrukcji użytkowania Glejte navodila za uporabo Pogledajte upute za upotrebu
	Achtung • Ostrzeżenie Pozor • Oprez
	Nicht wiederverwenden Nie używać powtórnie Samo za enkratno uporabo Nemojte ponovno upotrebljavati
	Trocken aufbewahren • Chronić przed wilgocią • Hranite na suhem Držite na suhom
	Vor Sonnenlicht schützen • Trzymać z dala od światła słonecznego Zaščititi pred sončno svetlobo Ne izlažite sunčevoj svetlosti

CE  
0 0 6 8

CMC Consumer Medical Care GmbH  
Eichendorffstraße 12-14  
89567 SONTHEIM/BRENTZ, GERMANY  
www.cmc-group.de

10468/0 (081220)

Blasenpflaster  
Plastry na odciski  
Oblži za žulje  
Flasteri za žuljeve

HARTMANN  
cosmos®