




# MediSet® PEG Sekretion



**1**

Hände waschen und desinfizieren (ggf. Mundschutz verwenden)

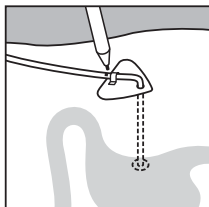


**2**

Die Sonde am oberen Rand der Halteplatte markieren


**3**

Zur Reinigung der Sondenaustrittsstelle die Halteplatte vorsichtig zurückziehen

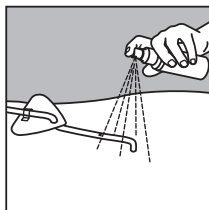


**4**

Besprühen der Sondenaustrittsstelle, Halteplatte und Sonde mit farblosem Hautdesinfektionsmittel, dann mit jeweils einer Vlieskompressen reinigen

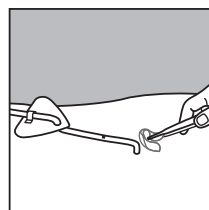


**5**

Sondenaustrittsstelle nochmals mit Hautdesinfektionsmittel besprühen (Einwirkzeit beachten)

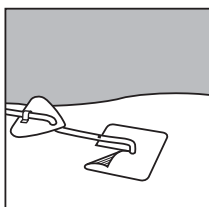


**6**

Schlitzkomresse mit Beschichtung nach unten zwischen Haut und Halteplatte um die Sonde legen

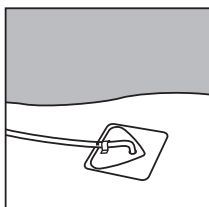


**7**

Halteplatte bis zur Markierung an der Sonde vorsichtig zurückschieben und mit dem Verschluss der Halteplatte fixieren

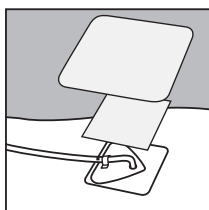


**8**

Halteplatte mit der vierten Vlieskomresse abdecken und mit Fixiervlies (Omnifix® elastic) fixieren

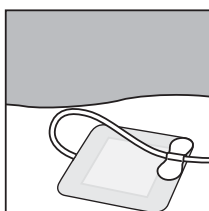

**9**

Drainagepflaster nach Möglichkeit auf Fixiervlies anbringen und darin die Sonde fixieren (Achtung: Knicken der Sonde vermeiden)

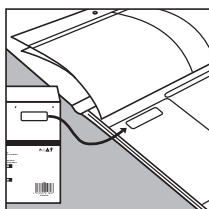

**10**

Maßnahmen dokumentieren. Hierzu kann das Dokumentationsetikett auf der Faltschachtelrückseite entnommen und in die Durchführungskontrolle der Patientenmappe geklebt werden






# MediSet® PEG Standard




- 1**  
Hände waschen und desinfizieren (ggf. Mundschutz verwenden)

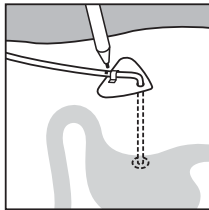


- 2**  
Die Sonde am oberen Rand der Halteplatte markieren

- 3**  
Zur Reinigung der Sondenaustrittsstelle die Halteplatte vorsichtig zurückziehen

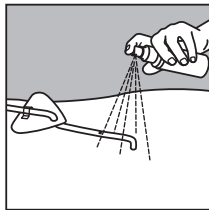

- 4**  
Besprühen der Sondenaustrittsstelle und Halteplatte mit farblosem Hautdesinfektionsmittel, dann mit jeweils einer Vlieskompressen reinigen

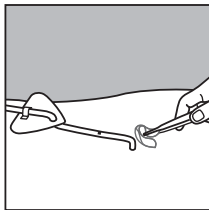




**5**

Sondenaustrittsstelle nochmals mit Hautdesinfektionsmittel besprühen (Einwirkzeit beachten)


**6**

Schlitzkomresse zwischen Haut und Halteplatte um die Sonde legen

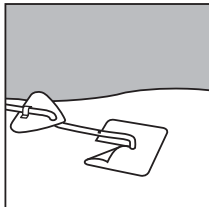


**7**

Halteplatte bis zur Markierung an der Sonde vorsichtig zurückschieben und mit dem Verschluss der Halteplatte fixieren

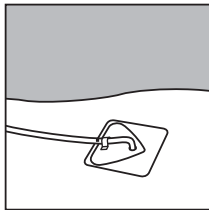


**8**

Halteplatte mit der dritten Vlieskomresse abdecken und mit Fixiervlies (Omnifix® elastic) fixieren

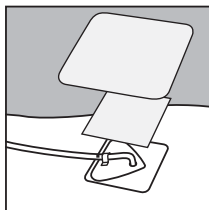

**9**

Maßnahmen dokumentieren. Hierzu kann das Dokumentationsetikett auf der Faltschachtelrückseite entnommen und in die Durchführungskontrolle der Patientenmappe geklebt werden

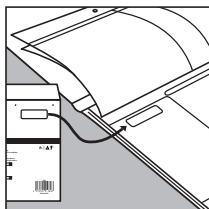




# MediSet® PEG Plus



**1**

Hände waschen und desinfizieren (ggf. Mundschutz verwenden)

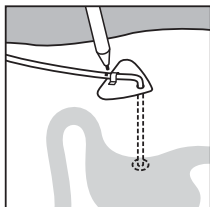


**2**

Die Sonde am oberen Rand der Halteplatte markieren


**3**

Zur Reinigung der Sondenaustrittsstelle die Halteplatte vorsichtig zurückziehen

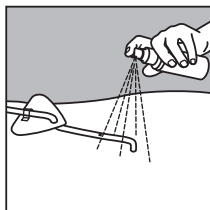


**4**

Besprühen der Sondenaustrittsstelle mit farblosem Hautdesinfektionsmittel, dann mit jeweils einer Vlieskompressen reinigen

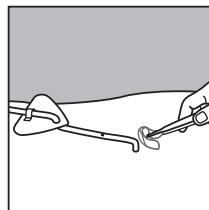


**5**


Sondenaustrittsstelle nochmals mit Hautdesinfektionsmittel besprühen (Einwirkzeit beachten)

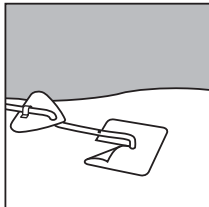



- 6**  
Schlitzkomresse zwischen Haut und Halteplatte  
um die Sonde legen

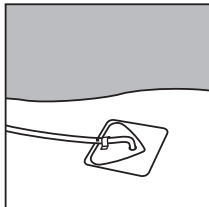

- 7**  
Halteplatte bis zur Markierung an der Sonde  
vorsichtig zurückschieben und mit dem Verschluss  
der Halteplatte fixieren

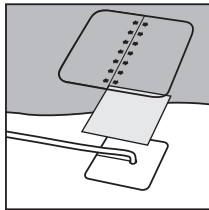

- 8**  
Halteplatte mit der dritten Vlieskomresse abdecken  
und mit transparentem Folienverband fixieren  
(Achtung: Schutzfolie entfernen)

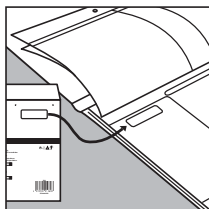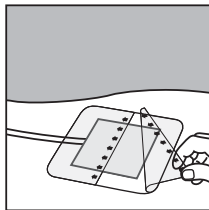

- 10**  
Maßnahmen dokumentieren. Hierzu kann das Doku-  
mentationsetikett auf der Faltschachtelrückseite  
entnommen und in die Durchführungskontrolle der  
Patientenmappe geklebt werden





**PAUL HARTMANN AG • 89522 Heidenheim, Germany**

**AT – PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. • 2355 Wiener Neudorf**



0 1 2 3



Stand der Information: 2009-10  
Datum van herziening de tekst: 2009-10

068 510/1 (0210)

**[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)**






# MediSet® SBK Sekretion




**1**

Hände waschen und desinfizieren (ggf. Mundschutz verwenden)

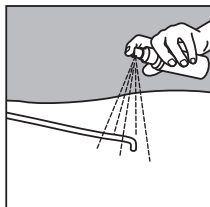

**2**

a.) Bei festgenähten Kathetern:  
Besprühen der Kathetereintrittsstelle und des Katheters mit farblosem Hautdesinfektionsmittel, dann mit jeweils einer sterilen Vlieskomresse reinigen

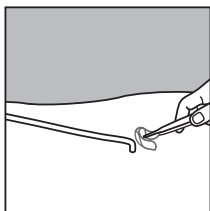

b.) Bei geblockten Kathetern mit Halteplatte:  
Katheter am oberen Rand der Fixierplatte markieren, die Blockung und die Lage des Katheters kontrollieren, Katheter aus der Fixierplatte entnehmen, Fixierplatte und Kathetereintrittsstelle mit farblosem Desinfektionsmittel besprühen, dann mit jeweils einer Vlieskomresse reinigen

c.) Bei geblockten Kathetern ohne Halteplatte:  
Besprühen der Kathetereintrittsstelle mit farblosem Desinfektionsmittel, dann mit ein bis zwei Vlieskompressen reinigen

**3**

Mit der dritten Vlieskomresse den Katheterschlauch reinigen








---

**4**

Kathetereintrittsstelle nochmals mit Hautdesinfektionsmittel besprühen (Einwirkzeit beachten)

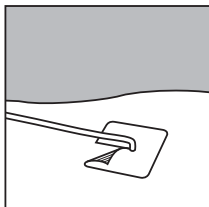


---

**5**

Schlitzkomresse mit der Beschichtung nach unten um den Katheter legen

Bei geblockten Kathetern: Katheter in Fixierplatte einlegen


Ohne Fixierplatte: Schlitzkomresse um den Katheter legen, Katheter wird nur durch äußeren Verband fixiert

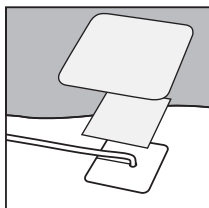

---

**6**


Katheter an der Eintrittsstelle mit der vierten Vlieskomresse abdecken und mit Fixiervlies (Omnifix® elastic) fixieren

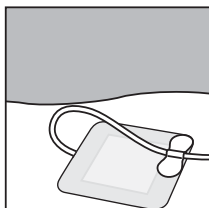

---

**7**

Drainagepflaster nach Möglichkeit auf dem Fixiervlies anbringen und darin den Katheterschlauch fixieren (Achtung: Knicken des Katheterschlauches vermeiden)

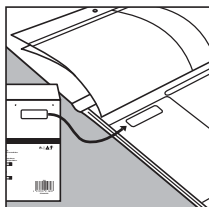

---

**8**

Maßnahmen dokumentieren. Hierzu kann das Dokumentationsetikett auf der Faltschachtelrückseite entnommen und in die Durchführungskontrolle der Patientenmappe geklebt werden






# MediSet® SBK Standard




**1**

Hände waschen und desinfizieren (ggf. Mundschutz verwenden)

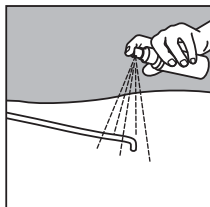

**2**

a.) Bei festgenähten Kathetern:  
Besprühen der Kathetereintrittsstelle mit farblosem Hautdesinfektionsmittel, dann die Eintrittsstelle mit ein bis zwei sterilen Vlieskompressen reinigen

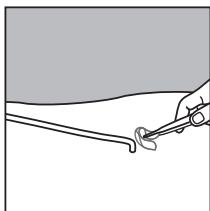


b.) Bei geblockten Kathetern mit Halteplatte:  
Katheter am oberen Rand der Fixierplatte markieren, die Blockung und die Lage des Katheters kontrollieren, Katheter aus der Fixierplatte entnehmen, Fixierplatte und Kathetereintrittsstelle mit farblosem Desinfektionsmittel besprühen, dann mit jeweils einer Vlieskompressen reinigen

c.) Bei geblockten Kathetern ohne Halteplatte:  
Besprühen der Kathetereintrittsstelle mit farblosem Desinfektionsmittel, dann mit ein bis zwei Vlieskompressen reinigen

**3**

Kathetereintrittsstelle nochmals mit Hautdesinfektionsmittel besprühen (Einwirkzeit beachten)



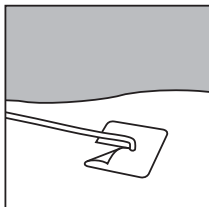

**4**


Schlitzkomresse um den Katheter legen

Bei geblockten Kathetern:

Katheter in Fixierplatte einlegen


Ohne Fixierplatte:

Schlitzkomresse um den Katheter legen, Katheter wird nur durch äußeren Verband fixiert

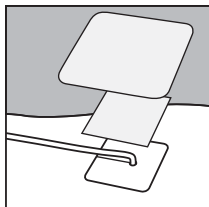

**5**

Katheter an der Eintrittsstelle mit der dritten Vlieskomresse abdecken und mit Fixiervlies (Omnifix® elastic) fixieren

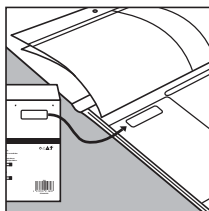

**6**


Maßnahmen dokumentieren. Hierzu kann das Dokumentationsetikett auf der Faltschachtelrückseite entnommen und in die Durchführungskontrolle der Patientenmappe geklebt werden

# MediSet® SBK Plus




**1**

Hände waschen und desinfizieren (ggf. Mundschutz verwenden)

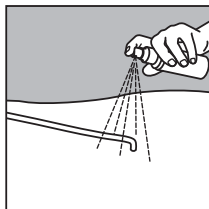

**2**

a.) Bei festgenähten Kathetern:  
Besprühen der Kathetereintrittsstelle mit farblosem Hautdesinfektionsmittel, dann die Eintrittsstelle mit ein bis zwei sterilen Vlieskompressen reinigen

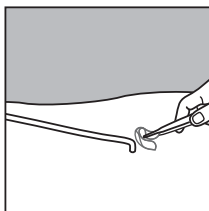


b.) Bei geblockten Kathetern mit Halteplatte:  
Katheter am oberen Rand der Fixierplatte markieren, die Blockung und die Lage des Katheters kontrollieren, Katheter aus der Fixierplatte entnehmen, Fixierplatte und Kathetereintrittsstelle mit farblosem Desinfektionsmittel besprühen, dann mit jeweils einer Vlieskomresse reinigen

c.) Bei geblockten Kathetern ohne Halteplatte:  
Besprühen der Kathetereintrittsstelle mit farblosem Desinfektionsmittel, dann mit ein bis zwei Vlieskompressen reinigen

**3**

Kathetereintrittsstelle nochmals mit Hautdesinfektionsmittel besprühen (Einwirkzeit beachten)

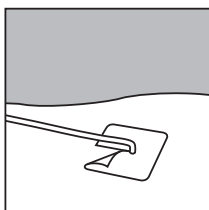

**4**


Schlitzkomresse um den Katheter legen

Bei geblockten Kathetern:

Katheter in Fixierplatte einlegen



Ohne Fixierplatte:

Schlitzkomresse um den Katheter legen, Katheter wird nur durch äußeren Verband fixiert

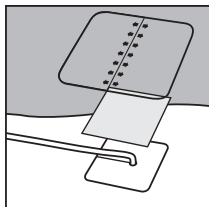

**5**

Katheter an der Eintrittsstelle mit der dritten Vlieskomresse abdecken und mit transparentem Folienverband fixieren (Achtung: Schutzfolie entfernen)

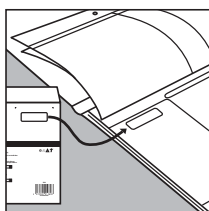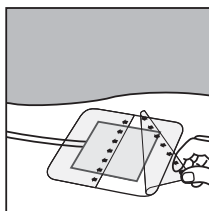

**6**

Maßnahmen dokumentieren. Hierzu kann das Dokumentationsetikett auf der Faltschachtelrückseite entnommen und in die Durchführungskontrolle der Patientenmappe geklebt werden

#### Handelsformen

	Berechnungseinheit	Artikel-Nr.	PZN
<b>MediSet® PEG/SBK Sekretion</b>	OP 10 Sets	455 501	158580 1
<b>MediSet® PEG/SBK Standard</b>	OP 10 Sets	455 502	158581 8
<b>MediSet® PEG/SBK Plus</b>	OP 10 Sets	455 503	158583 0



# MediSet<sup>®</sup> PEG/SBK

## Anwendungshinweise