

Veroval®

TESTE DE AUTODIAGNÓSTICO

HARTMANN

Gravidez

Teste de deteção precoce com indicador de semanas

5 min



Precisão
> 99 %



Grávida ou não?

Seguramente pretende uma resposta rápida e fiável a esta importante questão. Se a resposta for «Sim», de certeza que também deseja saber de quantas semanas está grávida.

Tomar conhecimento da situação: Teste de deteção precoce de gravidez e indicador de semanas num só

Com o teste de deteção precoce de gravidez com indicador de semanas, poderá saber se está grávida a partir do 10.º dia após a fecundação - portanto, mesmo antes do atraso menstrual. E se sim, de quantas semanas. O teste de deteção precoce de gravidez informa-a se está grávida logo que exista uma concentração de hCG de 12 UI/l (Unidades Internacionais por litro) na urina. No caso de um resultado positivo, deve consultar o seu médico ginecologista.

Qual a fiabilidade do teste Veroval®?

O teste de gravidez de deteção precoce com indicador de semanas foi desenvolvido com a finalidade de disponibilizar a precisão e fiabilidade dos diagnósticos modernos, para uso doméstico. Baseia-se na deteção imunológica da hormona da gravidez hCG (gonadotropina coriónica humana) e está em conformidade com a investigação científica moderna. **Dados sobre a performance do produto: Estudos confirmam uma fiabilidade superior a 99% na deteção de gravidez.**

Dados de desempenho*:

Para este teste foi calculado, num estudo clínico com 43 voluntários, entre os quais mulheres com valores hCG criticamente baixos, assim como mulheres com suspeita de gravidez, uma precisão e especificidade superior a 99%. Os valores de referência derivam de especificações hCG por meio de equipamentos de análise hormonal. *CARE diagnostica, 2008

A realização do teste é complicada?











Não: Necessitará apenas de um relógio com indicação de segundos e – se preferir o método do copo – um recipiente limpo. O procedimento exato para realização do teste é descrito no verso.

Informação importante:

No caso de uma concentração de hCG muito baixa – p. ex., no caso de o teste ser efetuado demasiado cedo ou com urina muito diluída – o teste pode apresentar um resultado negativo apesar da existência de uma gravidez. Inversamente, mesmo com um resultado positivo é possível abortar espontaneamente o que é bastante frequente nas primeiras quatro semanas. Caso não tenha a certeza, consulte sempre o seu médico ginecologista e/ou repita o teste de deteção precoce.

www.veroval.pt

Explicação dos símbolos

 Consultar instruções de utilização	 Dispositivo médico para diagnóstico in-vitro (para uso externo)	 Data de validade (ver impressão na embalagem)
 Conservar em local seco entre 4 °C – 30 °C.	 Conteúdo suficiente para 1 teste	 Não reutilizar
 Fabricante	 Número de referência	 Número de lote (ver impressão na embalagem)
 Marcação CE - Este produto preenche os requisitos da DIRECTIVA 98/79/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de Outubro de 1998 sobre dispositivos médicos de diagnóstico in vitro e está classificado como IVD para autodiagnóstico. O organismo notificado mdc (0483) realizou um procedimento de avaliação da conformidade.		

Componentes do teste: Folheto de instruções, 1 invólucro de alumínio com uma vareta de teste e líquido dessecante.

REF 924 323
ZANL0013-WB-PT-PH
Última revisão: 2022-12 (rev.03)

CARE diagnostica Produktions- und Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Römerstraße 8
2514 Traiskirchen, AUSTRIA

Distribuidor: PAUL HARTMANN LDA
Av. Severiano Falcão, 22-2º
2685-378 Prior Velho - PORTUGAL
info@pt.hartmann.info

CE 0483

Veroval®

TESTE DE AUTODIAGNÓSTICO



Gravidez

Teste de deteção precoce com indicador de semanas. Como se faz:

1



Conteúdo:

- 1 embalagem com invólucro de alumínio com um dispositivo de teste
- 1 folheto informativo

2

- Retire o dispositivo de teste do invólucro de alumínio (guardar a embalagem).

Existem dois métodos de execução:

3A



Abertura para a amostra de urina

Método direto:

- Mantenha o dispositivo de teste durante cerca de 3 segundos diretamente sob a urina.

3B



Profundidade máx. de imersão


Método do copo:

- Execute a colheita de urina e mergulhe o dispositivo de teste até à profundidade máxima de imersão durante cerca de 3 segundos.

4

- Coloque o dispositivo de teste sobre o invólucro de alumínio e não o mova.
- **Após exatamente 5 minutos poderá efetuar a leitura do resultado. Se efetuar a leitura posteriormente, a determinação da semana não poderá ser avaliada com segurança.**

Não grávida

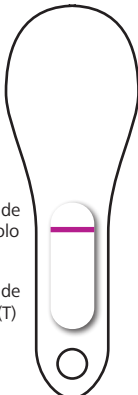

Se surgir apenas uma linha violeta (linha de controlo) na área superior do campo de resultado, o teste foi efetuado corretamente mas não foi detetada hCG. Não existe gravidez.

Se o período menstrual não surgir após uma semana de atraso, recomenda-se que consulte o seu médico. Em caso de falha do período, evite potenciais riscos como radiografias ou abuso de álcool.

Linha de controlo (C)

Linha de teste (T)


Grávida

Se surgirem duas linhas violetas no campo de resultado, comprovou-se a existência de hCG na urina. A gravidez confirma-se, mesmo que a linha inferior (T) seja muito tênue. Para a avaliação da semana de gravidez, faça o resultado corresponder a uma imagem. A semana de gravidez é calculada mediante o primeiro dia do seu último período menstrual.

Semana após a fecundação	1-2	2-3	3+
Semana de gravidez	3-4	4-5	5+

Uma linha de teste fraca pode ser indicativa de início de uma gravidez ou de uma fraca implantação do embrião. É muito importante tomar precauções, de forma a prevenir o nascimento prematuro. Consulte imediatamente o seu médico para assegurar a sua saúde e a do seu bebé. Evite possíveis riscos para o embrião (p. ex: radiografias).

Resultado inválido



(C)

(T)

O teste é considerado inválido se, após 5-10 minutos, não surgir uma linha violeta no campo de resultado ou se surgir apenas a linha de teste.

Medicamentos ou doenças (p. ex., doenças trofoblásticas) podem influenciar os seus níveis de hCG e distorcer o resultado. A pílula contraceptiva não influencia o teste.

Informação importante:

Após 20 minutos deixa de ser possível avaliar com precisão se está grávida. O facto de a embalagem se encontrar danificada, a conservação errada ou um erro na utilização (p. ex., quantidade insuficiente de urina), podem causar resultados inválidos. Neste caso, conserve todos os materiais do teste e entre em contacto connosco: info@pt.hartmann.info