

## MoliForm® Premium Soft



Spez.-Nr.: D 3.2230

Abteilung: SM-PDI

Datum: 2011-03-30

### 1. Allgemeine Produktbeschreibung

Inkontinenz-Einlagen mit Dry-Plus-Vlies, Verteilerauflage, Ultra-Saugkern und Nässeindikator; großflächiges Saugkissen; vollflächige Vliesabdeckung; flüssigkeitsabweisende, weiche Innenbündchen; anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; angenehme, flüssigkeitsundurchlässigem, textile Backsheet. Die MoliForm® Premium Soft bietet einen bestmöglichen Auslaufschutz durch hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliForm Premium Soft gewährleistet Schutz vor Rücknässung und bietet Schonung der Haut. MoliForm Premium Soft wird nach Saugstärken farblich unterschieden und ist mit elastischen Netzhöschchen (MoliPants®) leicht anzulegen und unauffällig zu tragen.

Produkteinstufung gemäß EG-Rahmenrichtlinie für unsterile Medizinprodukte der Klasse I

### 2. Anwendung

Bei jedem Grad der Inkontinenz, für bettlägerige und mobile, aktive Patienten geeignet. Für schwere Inkontinenz oder eine sichere Nachtversorgung stehen die extra saugstarken Qualitäten der MoliForm® Premium Soft Maxi / Super / Super Plus zur Verfügung. Variables Versorgungssystem für die individuelle Anforderung des Patienten.

### 3. Aufmachungen

Drei unterschiedliche Größen in 7 Saugstärken:

Größe:	Saugstärke:
MoliForm® Premium Soft Light	bei leichter Inkontinenz
MoliForm® Premium Soft Normal MoliForm® Premium Soft Plus	bei leichter Inkontinenz bei mittlerer Inkontinenz
MoliForm® Premium Soft Extra MoliForm® Premium Soft Maxi MoliForm® Premium Soft Super MoliForm® Premium Soft Super Plus	bei schwerer Inkontinenz bei schwerer Inkontinenz bei schwerster Inkontinenz bei schwerster Inkontinenz

## MoliForm® Premium Soft



Spez.-Nr.: D 3.2230

Abteilung: SM-PDI

Datum: 2011-03-30

### 4. Produkteigenschaften

Material:

- Wäscheschutz: Polypropylen/Polyethylen Vlies-Folien-Laminat weiß, gelb, grün, blau, rosa bzw. violett bedruckt
- Saugkörper (3-lagig):
  1. Lage (Verteilerlage): Zellulose „Curled Fiber“
  2. Lage: Zellstoff<sup>\*)</sup>, mit Superabsorbent Polymer
  3. Lage: 100 % Zellstoff<sup>\*)</sup>

\*) elementarchlorfrei gebleicht
- Vlies: Polypropylen - Vlies, hydrophil, weiß
- Innenbündchen: Polypropylen - Vlies, hydrophob, weiß
- Kleber: Schmelzhaftkleber
- Elastikfäden: Elastikfäden für Beinabschluss und Innenbündchen

## MoliForm® Premium Soft




Spez.-Nr.: D 3.2230

Abteilung: SM-PDI

Datum: 2011-03-30

### 5. Produktskizze

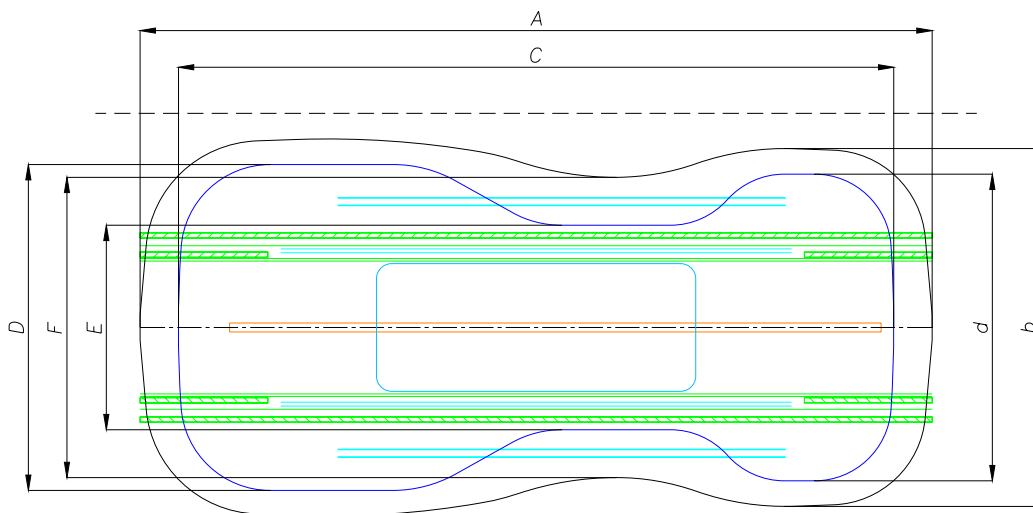

Abmessungen [mm]		Light	Normal	Plus	Extra	Maxi	Super	Super Plus
Gesamtlänge:	A	525 ± 30	620 ± 30	620 ± 30	690 ± 30	690 ± 30	690 ± 30	690 ± 30
Gesamtbreite Bauchseite:	b	260 ± 10	280 ± 10	280 ± 10	300 ± 10	300 ± 10	300 ± 10	300 ± 10
Gesamtbreite Rückenseite:	B	280 ± 10	295 ± 10	295 ± 10	310 ± 10	310 ± 10	310 ± 10	310 ± 10
Gesamtbreite Schritt:	F	210 ± 10	235 ± 10	235 ± 10	245 ± 10	245 ± 10	245 ± 10	245 ± 10
Saugkörperlänge:	C	474 ± 20	560 ± 20	560 ± 20	630 ± 20	630 ± 20	630 ± 20	630 ± 20
Saugkörperbreite Bauchseite:	d	215 ± 10	240 ± 10	240 ± 10	250 ± 10	250 ± 10	250 ± 10	250 ± 10
Saugkörperbreite Rückenseite:	D	242 ± 10	255 ± 10	255 ± 10	260 ± 10	260 ± 10	260 ± 10	260 ± 10
Saugkörperbreite Schritt:	E	134 -4/+10	160 -4/+10	160 -4/+10	170 -4/+10	170 -4/+10	170 -4/+10	170 -4/+10

## MoliForm® Premium Soft



Spez.-Nr.: D 3.2230

Abteilung: SM-PDI

Datum: 2011-03-30

### 6. Produktanforderungen

Prüfmerkmal:		Light	Normal	Plus	Extra	Maxi	Super	Super Plus
Gesamtgewicht <sup>1)</sup>	[g]	51	60	64	95	100	107	129
Superabsorbent Polymer Menge <sup>1)</sup>	[g]	5,5	6,6	11,4	12,5	16,4	23,5	20,4
Zellstoffgewicht <sup>1)</sup>	[g]	35,5	40,0	40,0	67,5	68,5	68,5	93,9
1. Einsickerzeit <sup>2)</sup>	[s]	max. 40	max. 90	max. 90	max. 90	max. 140	max. 140	max. 140
2. Einsickerzeit <sup>2)</sup>	[s]	max. 80	max. 140	max. 140	max. 140	max. 190	max. 190	max. 190
1. Rücknässung <sup>2)</sup>	[g]	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5
2. Rücknässung <sup>2)</sup>	[g]	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0	max. 5,0

<sup>1)</sup> ± 10% Toleranz (entspricht ± 3 s)

<sup>2)</sup> mit 50 ml bei Light; mit 100 ml Salzlösung bei Normal/Plus/Extra; mit 200 ml Salzlösung bei Super/Super Plus

### 7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem Code:

z.B.:

0  
Jahr

162  
lfd. Tag

XXXXX  
interner Schlüssel

### 8. Verpackung

MoliForm® Premium Soft in Polyethylen - Presspackbeutel verpackt; Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen; Palettierung auf Europalette.

30. März 2011

PAUL HARTMANN AG  
- Produktentwicklung SM-PDI -

i.A. 