

# MoliCare® Premium MEN PAD


## Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

### Zweckbestimmung

Bei MoliCare® Premium MEN PAD handelt es sich um nicht sterile Einlagen zum Einmalgebrauch. Die Produkte mit Zellstoffflocken eignen sich als Unisex-Einlagen (außer 2 Tropfen). Sie werden zur kurz- und langfristigen Versorgung bei leichter Harn- und Stuhlinkontinenz im Genitalbereich von Erwachsenen eingesetzt. Sie können länger als 30 Tage verwendet werden – sowohl von medizinischen Fachkräften als auch von Laien im Rahmen der professionellen Gesundheitsversorgung oder der häuslichen Pflege.

### Anwendung/Indikation

Produkte der Reihe MoliCare® Premium MEN PAD nehmen bei der Inkontinenzversorgung sowohl Urin als auch Stuhl auf.

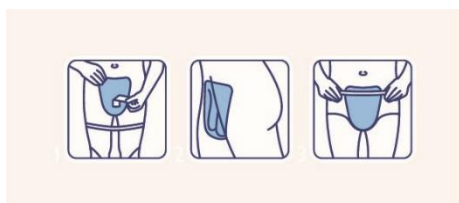

### Artikelnummern\*

Produkte	Version	Artikelnummer	Verpackung
MoliCare® Premium MEN PAD	MoliCare® MEN PAD 2 Tropfen (hellgrau)	168600	14
	MoliCare® MEN PAD 3 Tropfen (grün)	168603	14
	MoliCare® MEN PAD 4 Tropfen (blau)	168705/168707	14
	MoliCare® MEN PAD 5 Tropfen (orange)	168801/168807	14
	MoliCare® MEN PAD 2 Tropfen (hellgrau)	168 503	2
	MoliCare® MEN PAD 3 Tropfen (grün)	168 604	2
	MoliCare® MEN PAD 4 Tropfen (blau)	168 501	2
	MoliCare® MEN PAD 5 Tropfen (orange)	168 609	2

\*Möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.

### Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

### Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten von MoliCare® MEN PAD entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den jeweiligen vor Ort geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

# MoliCare® Premium MEN PAD

## Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

## Leistungsmerkmale des Produkts

MoliCare® Premium MEN PAD

Merkmale	2 Tropfen	3 Tropfen	4 Tropfen	5 Tropfen
Gesamtgewicht* [g]	13,9	15,0	22,1	34,4
Gewicht Saugkern* [g]	11,3	12,0	18,0	30,3

\* $\leq \pm 10\%$  Gewichtsabweichung

## Materialeigenschaften

Bestandteil	Material
Oberseite	Polypropylen-Vlies, hydrophil,
Saugkern (3-lagig)	1. Zellstofflage* 2. Lage mit Zellstoff-* / SAP-Gemisch 3. Lage mit Zellstoff, Curly Fiber (ausgenommen 3 Tropfen)
Rückseite	Polyethylen, Vlies-Folien-Laminat, weiß
Elastische Teile	Polyurethanschaum
Innenbündchen	Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß (ausgenommen 2 Tropfen)
Klebstoffe	Schmelzkraftkleber
Trägerpapier	Silikonpapier

\*elementarchlorfrei gebleicht

## Produktmerkmale

MoliCare® Premium MEN PAD

Abmessungen in mm	2 Tropfen	3 Tropfen	4 Tropfen	5 Tropfen
Gesamtlänge	260	260	345	345
Gesamtbreite	145	180	180	180
Länge Saugkern	240	215	307	307
Breite Saugkern	110	140	152	152

\* $\leq \pm 10\%$  Maßabweichung

# MoliCare® Premium MEN PAD

## Kennzeichnung


### 9-stelliger Chargen-Code

z. B.: 900102822




9	001	02	82	2
Jahr 201X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer

### Herstellungsdatum

z. B.: 

2019	10	10
Jahr	Monat	Tag

### Verfalldatum

z. B.: 

2022	10	10
Jahr	Monat	Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

### Medizinprodukt



### Einmalige Produktkennung



### Trocken aufbewahren



### Nicht wiederverwenden



### CE-Kennzeichnung



**Letzter Überarbeitungsstand: 2020-01-09**