

MoliCare® lady pads

Descrição geral do produto/Finalidade prevista

MoliCare® lady pads são dispositivos de uso único, unissexo, não estéreis, com celulose, para uma melhor gestão a curto prazo da perda de urina ligeira e incontinência fecal em adultos. São utilizados na área genital, podendo ser aplicados por leigos e profissionais de saúde em ambiente clínico e/ou doméstico por uso a longo prazo.

Aplicação/Indicação

Os produtos MoliCare® lady pads destinam-se à absorção de urina e fezes devido a incontinência.

Referências*

Produtos	Versão	Referências	Embalagem
MoliCare® lady pad	MoliCare® lady pad 0.5 Gotas (damasco)	168131	28
	MoliCare® lady pad 1 Gota (amarela claro)	168132	14
	MoliCare® lady pad 1.5 Gotas (amarelo escuro)	168624/168 626	14
	MoliCare® lady pad 2 Gotas (verde)	168634/168 636	14
	MoliCare® lady pad 3 Gotas (turquesa)	168644/168 646	14
	MoliCare® lady pad 3.5 Gotas (azul claro)	168651/168 671	14
	MoliCare® lady pad 4 Gotas (rubi vermelho)	168682/168 684	14
	MoliCare® lady pad 4.5 Gotas (roxo)	168654/168 656	14
	MoliCare® lady pad 0.5 Gotas (damasco)	168670/168 696	14
MoliCare® lady pad	MoliCare® lady pad 0.5 Gotas (damasco)	168 432	2
	MoliCare® lady pad 1 Gota (amarela claro)	168 430	2
	MoliCare® lady pad 1.5 Gotas (amarelo escuro)	168 431	2
	MoliCare® lady pad 2 Gotas (verde)	168 433	2
	MoliCare® lady pad 3 Gotas (turquesa)	168 434	2
	MoliCare® lady pad 3.5 Gotas (azul claro)	168 458	2
	MoliCare® lady pad 4 Gotas (rubi vermelho)	168 437	2
	MoliCare® lady pad 4.5 Gotas (roxo)	168 435	2
	MoliCare® lady pad 5 Gotas (tinta azul)	168 438	2

* pode não estar disponível em todos os países

Dispositivo de uso único

A reutilização de um dispositivo médico de uso único é perigosa. O reprocessamento de dispositivos, com a finalidade de os reutilizar, pode danificar seriamente a integridade e desempenho do produto. Informações disponíveis mediante pedido. A reutilização do produto pode causar contaminação microbiológica e/ou infeções leves da pele.

Eliminação do produto

Para minimizar o risco de possíveis infeções ou poluição ambiental, os componentes descartáveis de MoliCare® lady pads devem seguir os procedimentos de eliminação conforme a legislação local aplicável, as regras, os regulamentos e as normas de prevenção da infeção.

MoliCare® lady pads

Relatórios de incidentes

Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e em países com regime regulatório idêntico (Regulamento 2017/745/UE sobre dispositivos médicos); se, durante o uso deste dispositivo, ou como resultado do seu uso, ocorrer um incidente grave, informe o fabricante e/ou o seu representante autorizado e a sua autoridade nacional.

Características de desempenho do produto

MoliCare® lady pad

Características	0.5 Gotas	1 Gota	1.5 Gotas	2 Gotas	3 Gotas	3.5 Gotas	4 Gotas	4.5 Gotas	5 Gotas
Peso total* [g]	4,2	7,8	11,4	14,6	21,1	27,8	33,2	38,7	41,8
Peso do núcleo absorvente*	2,6	5,9	9,0	12,1	17,5	24,2	28,0	33,5	38,1

* ≤ ± 10% tolerância

Características do material

Componentes	Material
Camada superior:	Polipropileno em tecido não tecido, hidrofóbico, branco, tratado com Aloé Vera (exceto 0.5 Gotas)
Núcleo absorvente (3 camadas):	<ol style="list-style-type: none"> camada: polpa de celulose* (exceto 1 Gota) camada: polpa de celulose** com polímero superabsorvente camada: polpa de celulose*, "Curled Fiber" (exceto 0.5 Gotas)
Parte posterior:	Polietileno laminado com película em tecido não tecido, branco
Elásticos:	Espuma de poliuretano (exceto 0.5, 1 e 1.5 Gotas)
Adesivos:	colagem a quente ("hotmelt")

* branqueamento sem cloro elementar

Características do Produto

MoliCare® lady pad

Dimensões em mm	0.5 Gotas	1 Gota	1.5 Gotas	2 Gotas	3 Gotas	3.5 Gotas	4 Gotas	4.5 Gotas	5 Gotas
Comprimento total:	175	220	270	265	335	335	430	430	430
Largura total:	76	98	100	112	132	132	162	162	162
Comprimento do núcleo absorvente:	145	200	240	253	305	305	395	395	395
Largura do núcleo absorvente:	45	78	75	90	112	112	138	138	138

* ≤ ± 10% tolerância


Ficha Técnica

MoliCare® lady pads

Rotulagem

Código de lote com 9 dígitos

e.g.: 900102822

ex.: 	9	001	02	82	2
	ano 201X	chave interna	chave interna	chave interna	dígito de verificação acumulado

Data de fabrico

ex.: 	2019	10	10
	Ano	mês	dia

Data de validade

ex.: 	2022	10	10
	Ano	mês	Dia

Validade: 5 years

Dispositivo médico



Identificação de dispositivo exclusivo (UDI)



Manter seco



Não reutilizar



Marcação - CE



Data da última revisão: 08-01-2020