

## Technical Data Sheet

# Atrauman® Silicone



### Descripción general del producto

Atrauman® Silicone es un apósito a base de gel de silicona estéril, que actúa como malla de contacto con la herida para el tratamiento de lesiones. El apósito absorbe el exudado y libera humedad incluso aplicado a heridas secas, proveyendo un entorno húmedo que estimula la curación de la herida. El gel que se encuentra en la capa en contacto con la herida previene la adhesión del apósito a la herida. El apósito puede retirarse atraumáticamente y sin dejar residuos.

Atrauman® Silicone lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase IIb (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Atrauman® Silicone que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Atrauman® Silicone quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.


### Aplicaciones/Indicaciones

Atrauman® Silicone está indicado como capa de contacto con la herida para:

- El tratamiento de heridas superficiales agudas y crónicas de todo tipo, con exudación ligera o moderada
- La combinación con el sistema terapéutico de presión negativa para heridas Vivano®, especialmente en zonas de heridas con presencia de órganos y otras estructuras sensibles expuestas
- Su uso como capa de protección en heridas no exudativas y localizaciones con piel sensible

### Características del producto

Partes	Materiales
Material de soporte	Red de politereftalato de etileno (PET)
Impregnación malla soporte	Silicona 100%
Lámina siliconada protectora	Polietileno

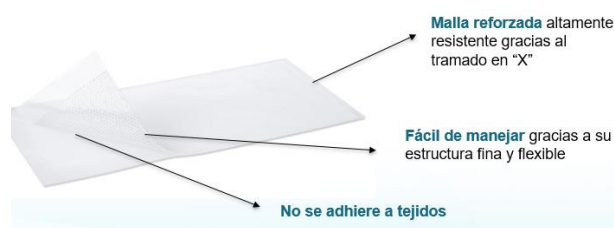

<

**Atrauman® Silicone****Propiedades específicas de producto**

Gramaje:	224 - 272 g/m <sup>2</sup>
Gramaje silicona:	180 - 220 g/m <sup>2</sup>
Abertura del poro:	≥ 96 %

El producto se esteriliza con óxido de etileno (EO) de acuerdo con el estándar DIN EN ISO 11135.

Látex: no contiene látex.

**Presentaciones**

Producto	Formato	Unidades / estuche	Ref. HARTMANN
Atrauman® Silicone	5 x 7 cm	5 unidades	499567
Atrauman® Silicone	7,5 x 10 cm	5 unidades	499561
Atrauman® Silicone	10 x 20 cm	5 unidades	499563
Atrauman® Silicone	20 x 30 cm	5 unidades	499565

**Etiquetado**

Número de lote de 9 cifras:

ej.:

LOT

X

Año

XXX

Código de uso  
interno

XX

Semana de  
producción

XXX

Código de uso  
interno

Fecha de caducidad:

ej.:



2019

Año

04

mes

Caducidad del producto: 5 años.

**Acondicionamiento**

Atrauman® Silicone se envasa individualmente en sobres estériles, en estuches y en cajas de transporte de acuerdo con normas DIN, selladas con cintas adhesivas y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.