

## Technical Data Sheet

# Tiritas® EFFECT Ampollas



### Descripción general del producto

Tiritas® EFFECT Ampollas son apósitos hidrocoloides transparentes para el tratamiento de ampollas. El cuerpo hidrocoloide alivia el dolor y la presión y es particularmente suave y agradable. El soporte de film de poliuretano del apósito garantiza una protección óptima de la herida y de la almohadilla hidrocoloide. El apósito es impermeable al agua, la suciedad y las bacterias.

Tiritas® EFFECT Ampollas lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase IIa (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Tiritas® EFFECT Ampollas que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Tiritas® EFFECT Ampollas quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

### Aplicaciones/Indicaciones

Para el tratamiento efectivo de ampollas.

#### Instrucciones de uso:

- Utilice solo el apósito si el cuerpo hidrocoloide cubre toda la superficie de la ampolla
- Lávese las manos y asegúrese de que la región cutánea afectada esté limpia, seca y exentas de grasa antes de aplicar el apósito
- Retire la película protectora del apósito
- Adhiera el apósito sobre la región a tratar. Presione los bordes del apósito para asegurar una sujeción óptima
- No retire el apósito hasta que empiece a desprenderse por sí mismo
- En caso de querer retirar el apósito antes, humedezca el apósito con agua caliente durante unos segundos

#### Advertencias de uso:

- Los apósitos no deben aplicarse nunca en caso de infección
- Si tiene diabetes mellitus consulte siempre a su médico antes de aplicar el apósito
- Consulte a su médico en caso de que la ampolla presente signos de infección mientras se lleva el apósito (por ejemplo, enrojecimiento intenso, sobrecalentamiento, hinchazón o dolores)
- No abra las ampollas que estén cerradas. Abrir una ampolla siempre conlleva riesgos de infección

## Tiritas® EFFECT Ampollas

### Características del producto

#### Tiritas EFFECT Ampollas pequeñas y talón

Partes	Materiales
Soporte	Film de poliuretano transparente, con adhesivo acrílico
Gasa	Masa hidrocoloide adhesiva y transparente
Protector	Papel siliconado blanco

#### Tiritas EFFECT XL y a tu medida

Partes	Materiales
Soporte	Masa hidrocoloide adhesiva y transparente
Gasa	Masa hidrocoloide adhesiva y transparente (no aplica a Ampollas, a tu medida)
Protector	Papel siliconado blanco

### Ventajas del producto

- Apósito hidrocoloide para un tratamiento efectivo de ampollas
- Mecanismo de acción por tratamiento húmedo de heridas
- Favorecen la curación y cicatrización de la ampolla
- Alivia el dolor y la presión inmediatamente
- Acolchado transparente, suaves con la piel
- Efecto segunda piel y de fácil aplicación
- Impermeable al agua, transpirable
- Impermeable a las bacterias y a la suciedad
- El apósito puede permanecer varios días sobre la ampolla
- Los apósitos se presentan sellados de forma práctica en envases individuales protectores y adecuados para su transporte (excepto en Ampollas, a tu medida)



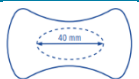


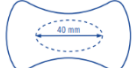
### Propiedades específicas de producto

Látex: no contiene látex

Biocompatibilidad testada conforme a EN ISO 10993-1,-5 y -10 (citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica).  
Dermatológicamente testado.

## Tiritas® EFFECT Ampollas

### Presentaciones

Producto		Formato	Unidades / estuche	Ref. HARTMANN	CN
Tiritas® EFFECT Ampollas pequeñas		55 x 19 mm	6	536034	202517
Tiritas® EFFECT Ampollas XL		75 x 45 mm	6	536044	159302
Tiritas® EFFECT Ampollas talón		76 x 45 mm	5	536014	202516
Tiritas® EFFECT Ampollas, a tu medida		90 x 65 mm	3	536064	342969
Tiritas® EFFECT Ampollas surtido	 	55 x 19 mm (x4) 76 x 45 mm (x3)	7	536051	176213

### Etiquetado

Número de lote de 9 cifras:

ej.:

**LOT**

X

Año

XXX

Nº correlativo  
del pedido

XX

Semana de  
producción

12

Fabrica

XX

Dígito de control

Fecha de caducidad de 6 cifras:

ej.:



2019

Año

04

mes

Caducidad del producto: 3 años.

### Acondicionamiento

Tiritas® EFFECT Ampollas se envasan en estuche y en caja de embalaje de acuerdo con las normas EN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.