

Technical Data Sheet

Tiritas® MEDICAL Sangrado leve



Descripción general del producto

Tiritas® Medical Sangrado leve es un apósito autoadhesivo transparente, con una compresa absorbente que no se adhiere a la herida. Gracias a la transparencia y delgadez de la lámina, se puede comprobar en todo momento el área alrededor de la herida y las secreciones absorbidas por la compresa. De este modo se evitan cambios innecesarios del apósito y no se entorpece el proceso de curación. Dado que el producto es resistente a la entrada de agua y evita la penetración de gérmenes, el riesgo de infecciones secundarias se minimiza y el paciente puede bañarse o ducharse.

Tiritas® Medical Sangrado leve lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase IIa (TÜV SÜD 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Tiritas® Medical Sangrado leve que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Tiritas® Medical Sangrado leve quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones/Indicaciones

Indicado para el cuidado estéril de heridas post-quirúrgicas levemente exudativas y para cubrir heridas por cirugía o lesiones. El producto no debería utilizarse en heridas clínicamente infectadas, sangrantes o altamente exudativas.

Pasos para una correcta aplicación:


Paso 1: retirar la lámina 1.

Paso 2: pegar la zona del apósito descubierta en la zona deseada.

Paso 3: retirar la lámina 2.

Paso 4: pegar la zona del apósito nuevamente descubierta en la zona deseada.

Paso 5: retirar la lámina 3 y posteriormente la 4.

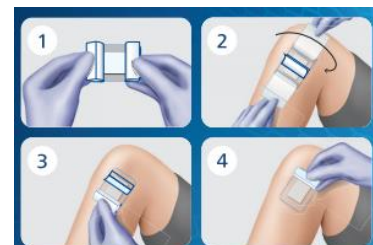

Características del producto

Partes	Materiales
Soporte	Capa de poliuretano
Adhesivo	Adhesivo acrílico, hipoalergénico, sin colofonia
Protector	Papel siliconado
Compresa de gasa	Fibras de viscosa; red antiadherente de polietileno

Tiritas® MEDICAL Sangrado leve

Ventajas del producto

Soporte resistente y transpirable:

- Soporte de poliuretano muy resistente y flexible
- Permite máxima transpirabilidad
- Bordes redondeados evitan que se despegue el producto por fricción

Adhesivo 100% libre de látex e hipoalergénico:

- No deja residuos
- Permite una óptima transpirabilidad del apósito

Compresa central:

- Tiene una alta capacidad de absorción y un efecto de acolchado
- No se adhiere a la herida

Propiedades específicas de producto

Látex: no contiene látex.




Método de esterilización: óxido de etileno.

Requerimientos de producto

Fuerza adhesiva:	> 4 N / 25 mm
Valor típico:	1.300 g / m ² / 24h aprox.
Deformación persistente:	1 %
Conformabilidad (EN 13726-4):	1,2 N / cm
Capacidad de absorción de la compresa de gasa (EN 13726-1):	> 11 g/ 100 cm ²
Velocidad de transmisión de vapor de agua (EN 13726-2):	1.100 g/m ² / 24h

Tiritas® MEDICAL Sangrado leve

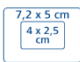Presentaciones

Producto	Formato	Unidades / estuche	Ref. HARTMANN	CN
Tiritas® Medical Sangrado leve	 7,2 x 5 cm	5	531206	181734
Tiritas® Medical Sangrado leve	 10 x 9 cm	5	531207	181736
Tiritas® Medical Sangrado leve	 9 x 15 cm	5	531201	182936
Tiritas® Medical Sangrado leve	 10 x 20 cm	5	531202	182937


Etiquetado

Número de lote de 9 cifras:

ej.:

LOT	X	XX	XXX	XXX
	Año	Semana de producción	Código de uso interno	Código de uso interno

Fecha de caducidad de 6 cifras:

ej.:  2019 04
Año mes

Caducidad del producto: 5 años.

Acondicionamiento

Tiritas® Medical Sangrado leve se presenta acondicionado en envase unitario estéril y estos se envasan en estuche. Los estuches se empaquetan en cajas de embalaje de acuerdo con las normas EN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.